


KURZANLEITUNG



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie das benötigte Programm.



Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Röhrchens, dass sich die gesamte Flüssigkeit oder das Lyophilisat am Boden des Röhrchens befindet.

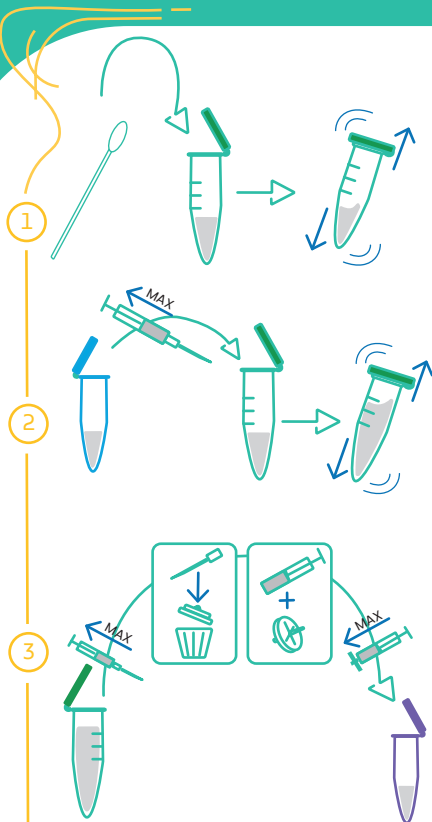

Tauchen Sie das für den Nasenabstrich verwendete Stäbchen in die Flüssigkeit, drehen Sie es in der Flüssigkeit hin und her und drücken Sie es beim Entfernen an der Innenwand des **grünen Röhrchens** aus.

Schütteln Sie das **grüne Röhrchen** kräftig.

Übertragen Sie den gesamten Inhalt des **blauen Röhrchens** mit der **Spritze** in das **grüne Röhrchen** und schütteln Sie es kräftig.


Entnehmen Sie mit der Spritze so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem **grünen Röhrchen**.

Es ist nicht nötig, den gesamten zuvor gebildeten Schaum zu entnehmen.

Entsorgen Sie die **Nadel** und versehen Sie die **Spritze** mit dem beigefügten **Filter**.

Setzen Sie den **Filter** in das **violette Röhrchen** ein und entleeren Sie den Inhalt der **Spritze** in das **violette Röhrchen**.

4

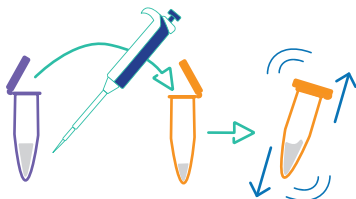


Versehen Sie die benötigten Pipetten mit einer passenden Filterpipettenspitze.

Entnehmen Sie mithilfe der **blauen Pipette** die entsprechende Menge der Flüssigkeit des **violetten Röhrchens**.


Geben Sie diese Menge in das **orangefarbenen Röhrchen** und schütteln Sie dieses kräftig.

5

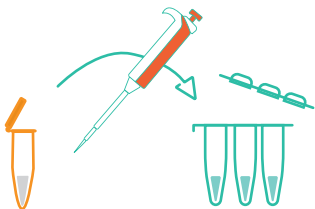

Entnehmen Sie mithilfe der **orangefarbenen Pipette** die entsprechende Menge der Flüssigkeit des **orangefarbenen Röhrchens** und geben Sie diese in jedes Miniröhrchen.

6

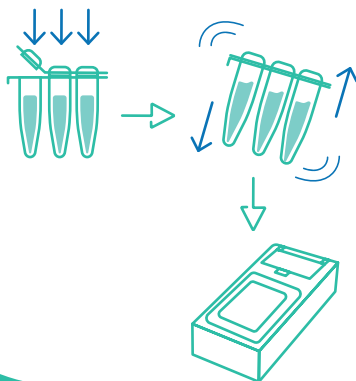

Verschließen Sie die **Miniröhrchen** mit einem hörbaren Klick und schütteln Sie diese kräftig.

Lassen Sie dann alle Tröpfchen zu Boden sinken und entfernen Sie etwaige Luftbläschen durch Klopfen.

Geben Sie die **Miniröhrchen** in das **Gerät** (platzieren Sie die Markierung links) und schließen Sie den Deckel des **Geräts**, um die Analyse zu starten.



Öffnen Sie die Miniröhrchen unter keinen Umständen, nachdem diese in das Gerät eingefügt wurden und die Analyse gestartet oder beendet ist. Lassen Sie die Miniröhrchen nicht in dem Gerät, sondern entfernen Sie diese, sobald die Analyse beendet ist.

Achten Sie auf die Hinweise im Benutzerhandbuch, um genauere Informationen zu erhalten:

Kontakt: +49 (0)2173 9935548 • kundendienst@enalees.com



bit.ly/manuel-de-enalees